

ロータノード®  
XRR-6652X

ロータノード XRR-6652X は、0.8と0.3の多重焦点をもち、最高使用管電圧150kVの回転陽極X線管装置で、高速回転で使用できます。

このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施し、レニウムタングステン・モリブデンを張り合せた大容量陽極ターゲットを採用しております。

一般定格

電撃に対する保護の形式：

程度による分類 (IEC60601-1:2005+A1:2012) ..... クラス I ME EQUIPMENT

電氣的定格：

使用回路：

高電圧装置 ..... 定電圧形X線高電圧装置

接地方式 ..... 中性点接地方式

公称最高管電圧：

撮影時 ..... 150 kV

連続透視時 ..... 125 kV

公称焦点値：

大焦点 ..... 0.8

小焦点 ..... 0.3

公称陽極入力 (照射時間0.1s) : 最大入力図参照

	180 Hz	60 Hz	50 Hz
大焦点 .....	52 kW	30 kW	29 kW

小焦点 .....	12 kW	6.5 kW	6.1 kW
-----------	-------	--------	--------

公称撮影陽極入力：

	180 Hz	60 Hz	50 Hz
大焦点 .....	52 kW	30 kW	29 kW

小焦点 .....	12 kW	6.5 kW	6.1 kW
-----------	-------	--------	--------

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。

★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

駆動特性：

ステータ：XS-AG

		起動時		定常時	
駆動周波数	[Hz]	180	60	180	50/60
電力	[W]	3710	800	200	90
電圧 <sup>3)5)</sup>	[V]	420	190	80	48
電流 <sup>4)</sup>	[A]	9.6	10.2	3.0	2.2
起動時間 <sup>1)7)</sup>	[s]	1.2	0.8	—	—
分相コンデンサ容量	[ $\mu$ F]	6	44	6	44
制動時間 <sup>2)7)</sup>	[s]	2.0 (DC 100V)			

- 注 1) 駆動特性表に記載している起動時間は、0～高速回転に要する値です。  
透視と撮影を繰り返す低速～高速回転起動の場合は、起動時間は記載値の2/3になります。
- 2) 高速回転から停止までの時間です。
- 3) 主コイル-コモン間電圧
- 4) コモン電流
- 5) 表中の各電圧値は、1.1倍を超えて印加しないこと。
- 6) 高速での使用頻度は、1分間に2回を超えないこと。
- 7) 起動、制動時間は、表中各値の1.1倍を超えて印加しないこと。

陽極回転数：

180 Hz電源	9700 min <sup>-1</sup> 以上
60 Hz電源	3200 min <sup>-1</sup> 以上
50 Hz電源	2700 min <sup>-1</sup> 以上

ステータ抵抗：

共通-主コイル	9.4 $\Omega$
共通-補助コイル	28.3 $\Omega$
絶縁抵抗（低電圧側）	2 M $\Omega$ 以上
正常使用における管容器温度範囲	16 ~ 75 $^{\circ}$ C
動作モード	間欠

## 機械的定格：

## 外形寸法：

全 長 ..... 445.3 mm  
 最大部直径 ..... 165.6 mm

## ターゲット：

角 度 ..... 12 °  
 直 径 ..... 100 mm  
 材 質 ..... レニウムタングステン

固有ろ過 ..... アルミニウム当量 1.5 mm / 75 kV

## X線遮蔽：

IEC60601-1-3:2008を満足する。

漏洩線量測定条件 ..... 150 kV, 3.3 mA

X線照射範囲 ..... SID 1000 mmにて430 × 430 mm

## 質 量

X線管本体 ..... 約 23 kg  
 冷却装置（熱交換器およびホース） ..... 約 17 kg

高電圧端子 ..... IEC60526形 Corrigendum1:2010

冷却方式 ..... 強制油冷

使用位置 ..... 任意

## 絶対最大定格

(いかなる場合でもこの値を超えてはならない)

公称最高管電圧：

撮影時 ..... 150 kV

連続透視時 ..... 125 kV

陽極（または陰極）アース間 ..... 75 kV

最低使用管電圧 ..... 40 kV

最大使用管電流：

大焦点 ..... 700 mA

小焦点 ..... 150 mA

最大フィラメント電流：

大焦点 ..... 5.5 A

小焦点 ..... 5.0 A

フィラメント電圧：

大焦点 (5.5A) ..... 11.6 ~ 14.8 V

小焦点 (5.0A) ..... 4.6 ~ 5.8 V

使用フィラメント加熱電源回路 ..... AC 25 kHz 以下

連続陽極入力 ..... 500 W (700 HU/s)

熱特性：

陽極熱容量 ..... 420 kJ (600 kHU)

陽極冷却率 ..... 1670 W (2300 HU/s)

管装置熱容量 ..... 1420 kJ (2000 kHU)

公称連続入力：

強制油冷（熱交換器，管球カバーなし） ..... 1000 W (84.7 kHU/min)

## 許容環境条件

### 使用環境条件：

使用時環境温度 ..... 10 ~ 40 °C

使用時湿度 ..... 30 ~ 85 %

(結露ないこと)

使用時気圧 ..... 70 ~ 106 kPa

### 輸送条件および保管条件：

輸送および保管温度 ..... -15 ~ 70 °C

輸送および保管湿度 ..... 10 ~ 90 %


(結露ないこと)

輸送および保管気圧 ..... 50 ~ 106 kPa


### 最大単発負荷定格

動作条件：定電圧形 X線高電圧装置  
 ステータ電源周波数 180 Hz

公称焦点値：0.8 ■

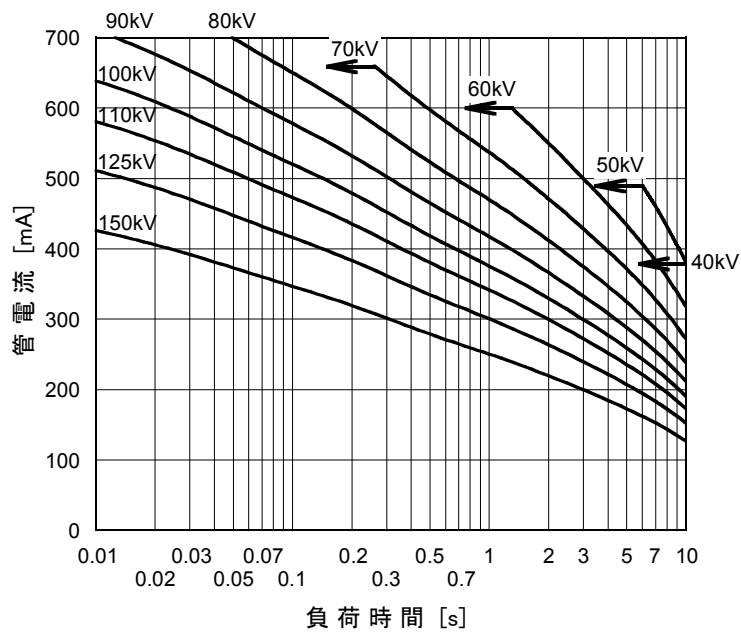


公称焦点値：0.3 □

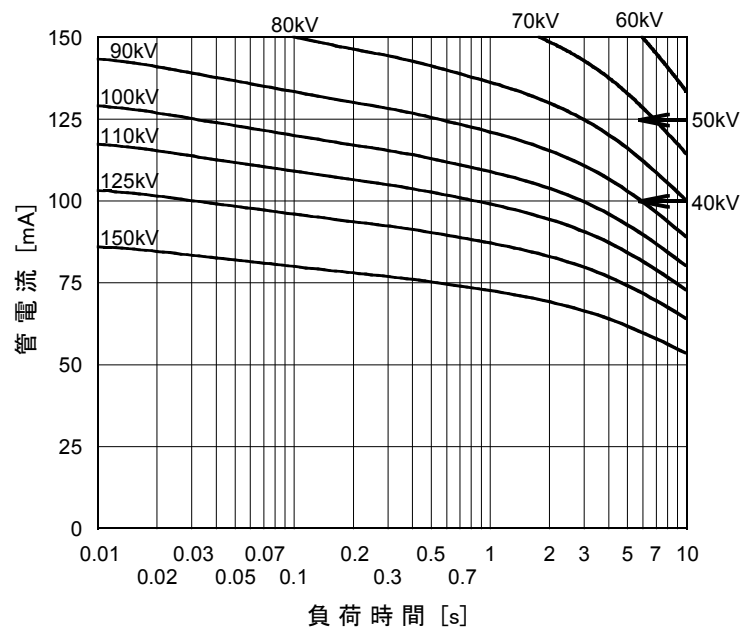


### 最大単発負荷定格

動作条件：定電圧形 X線高電圧装置  
 ステータ電源周波数 60 Hz

公称焦点値：0.8 ■

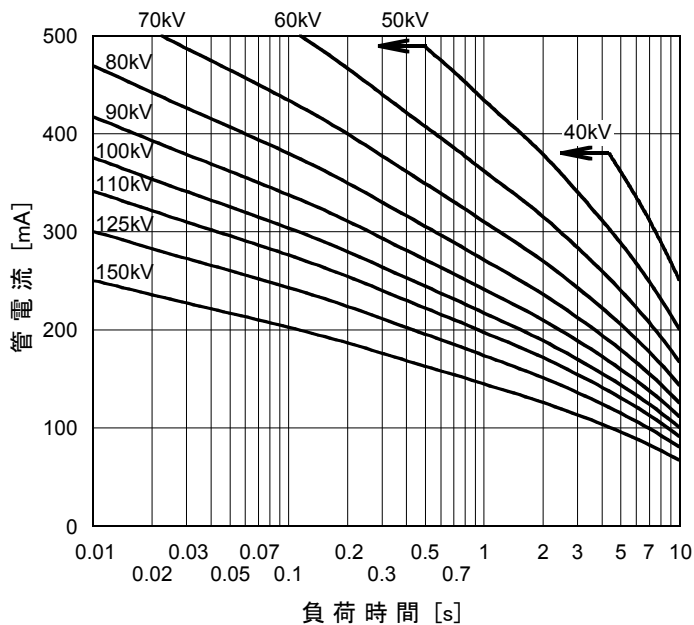


公称焦点値：0.3 □

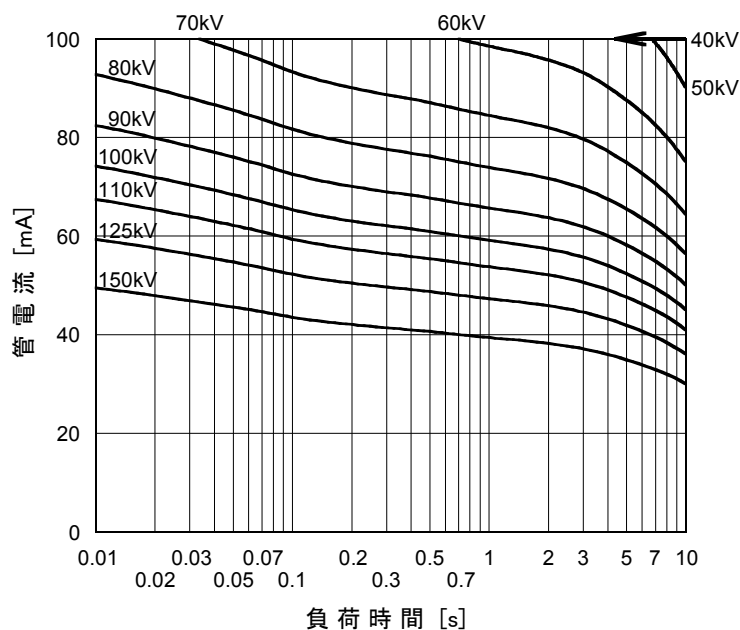


### 最大単発負荷定格

動作条件：定電圧形 X線高電圧装置  
 ステータ電源周波数 50 Hz

公称焦点値：0.8 ■

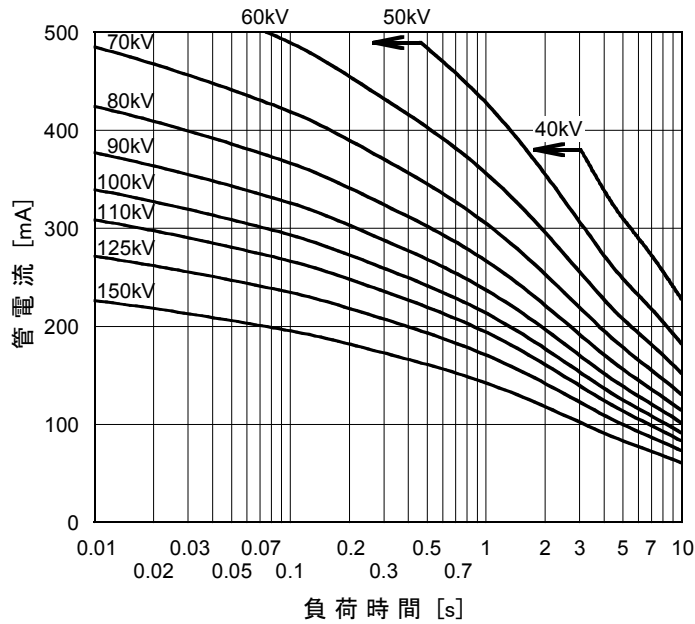

公称焦点値：0.3 □

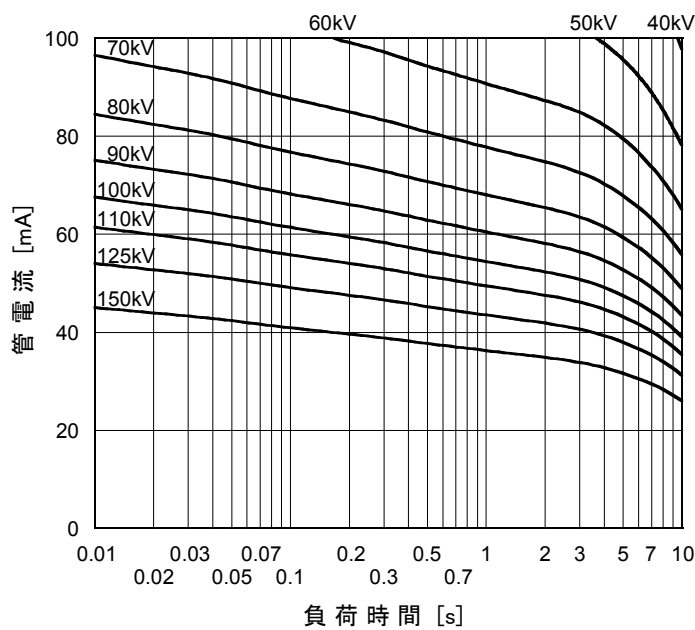




### 管電流特性・フィラメント特性

定電圧形 X線高電圧装置


公称焦点値：0.8

(代表値)

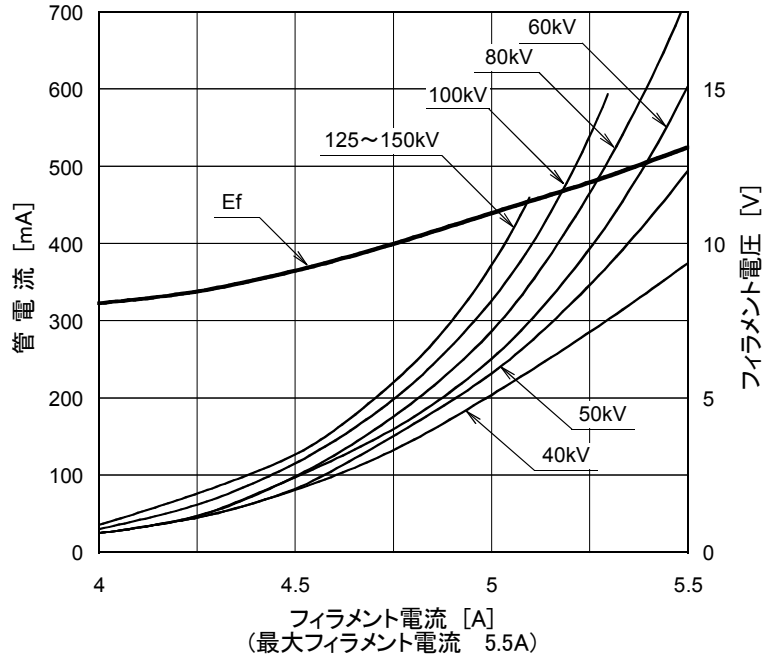


公称焦点値：0.3

(代表値)

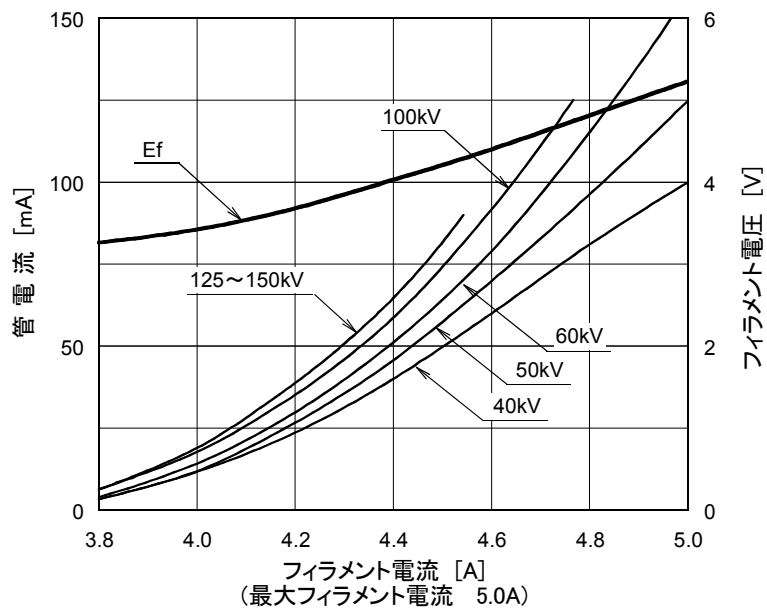


### 熱特性図

X線管装置加熱・冷却曲線  
(周囲温度 25℃において)

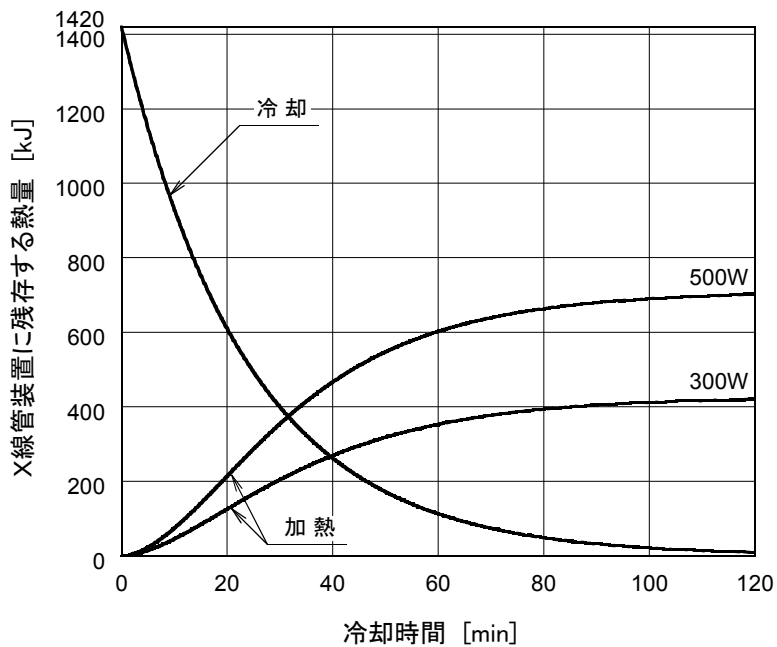


陽極加熱・冷却曲線

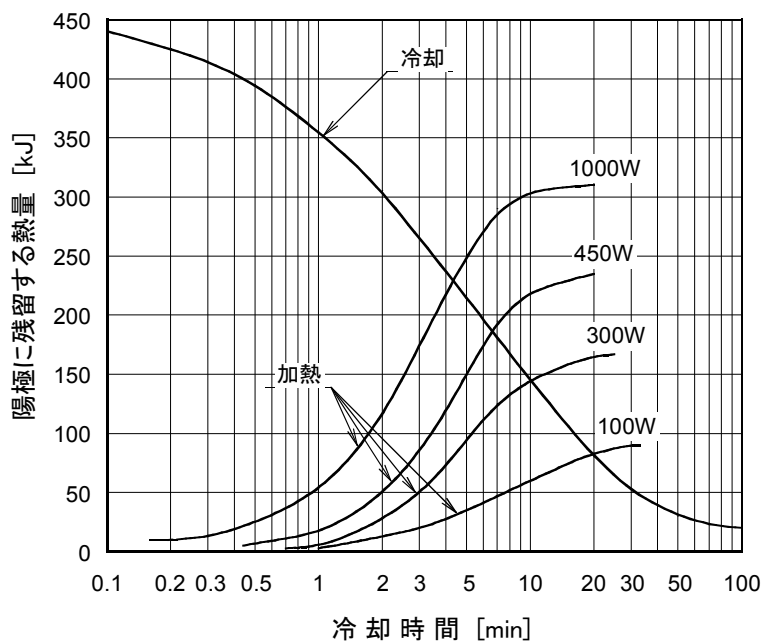

外形図

単位 mm

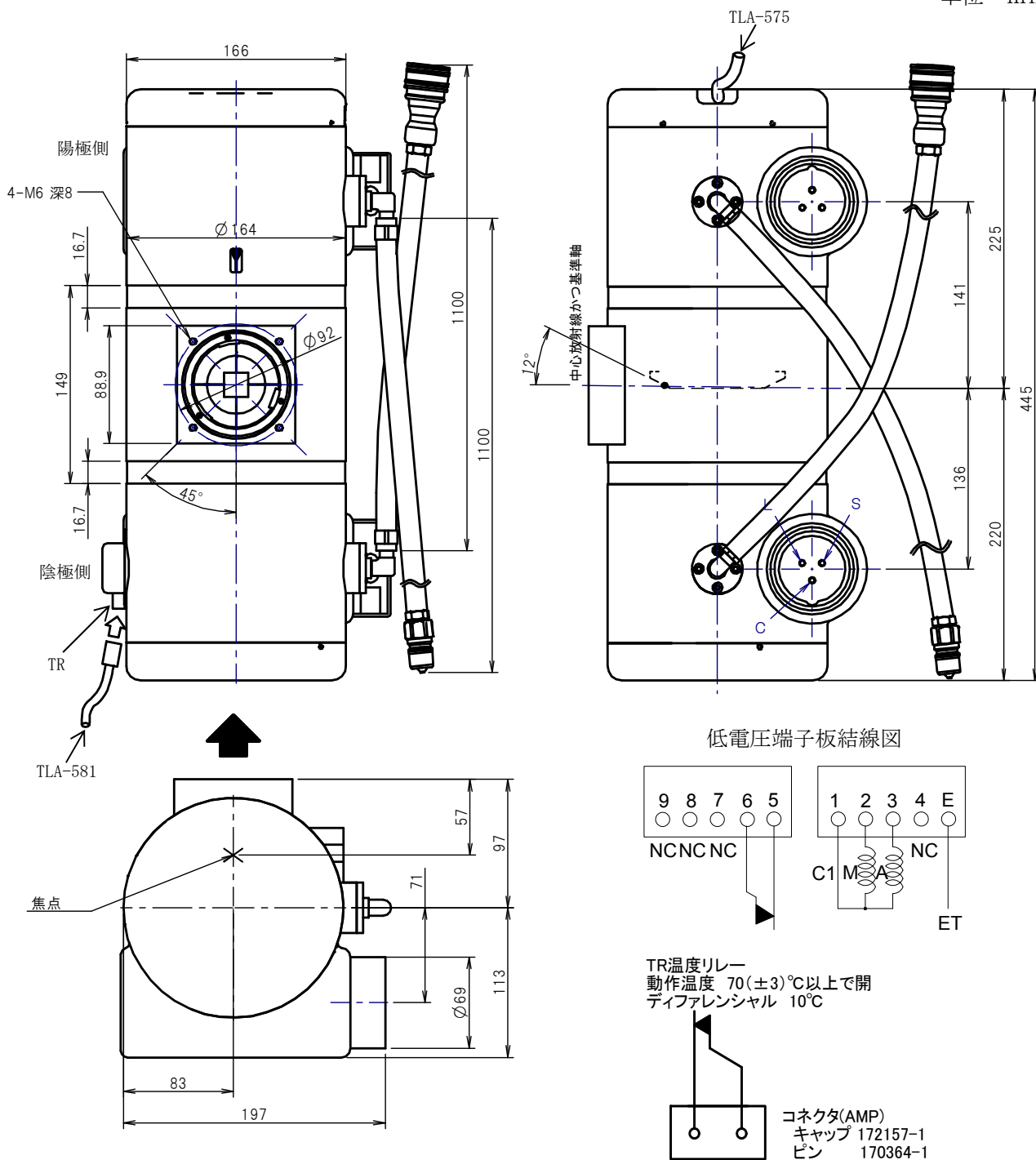

記号説明

陰極端子:

- C.... 共通
- L.... 大焦点
- S.... 小焦点

低電圧端子:

- C1.... 共通
- M.... ステータ主コイル
- A.... ステータ補助コイル
- ET.... 接地端子
- NC.... 接続線なし
- TR.... 温度リレー (常時閉)



▲: 主放射線方向

陽極, 陰極端子: IEC60526形

放射口のALフィルターを含めて公称固有共振周波数を満たしているため取り外さないこと。

外形図  
(熱交換器)

単位 mm

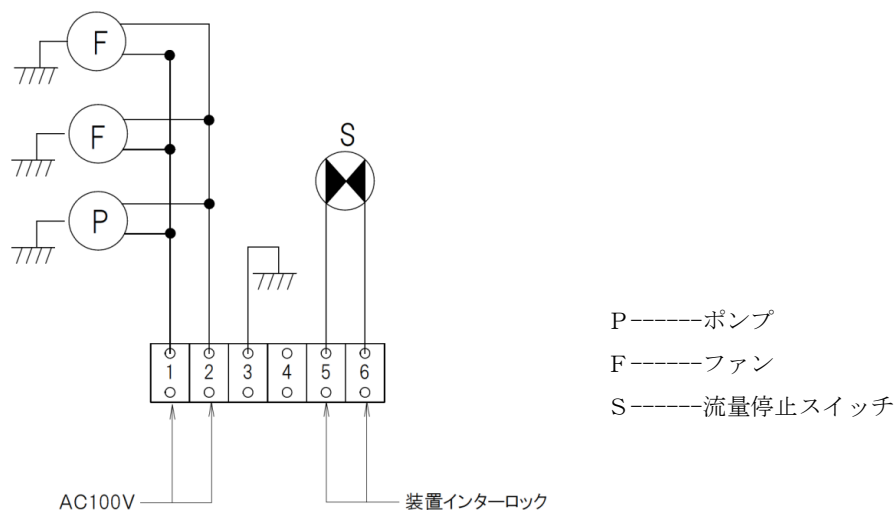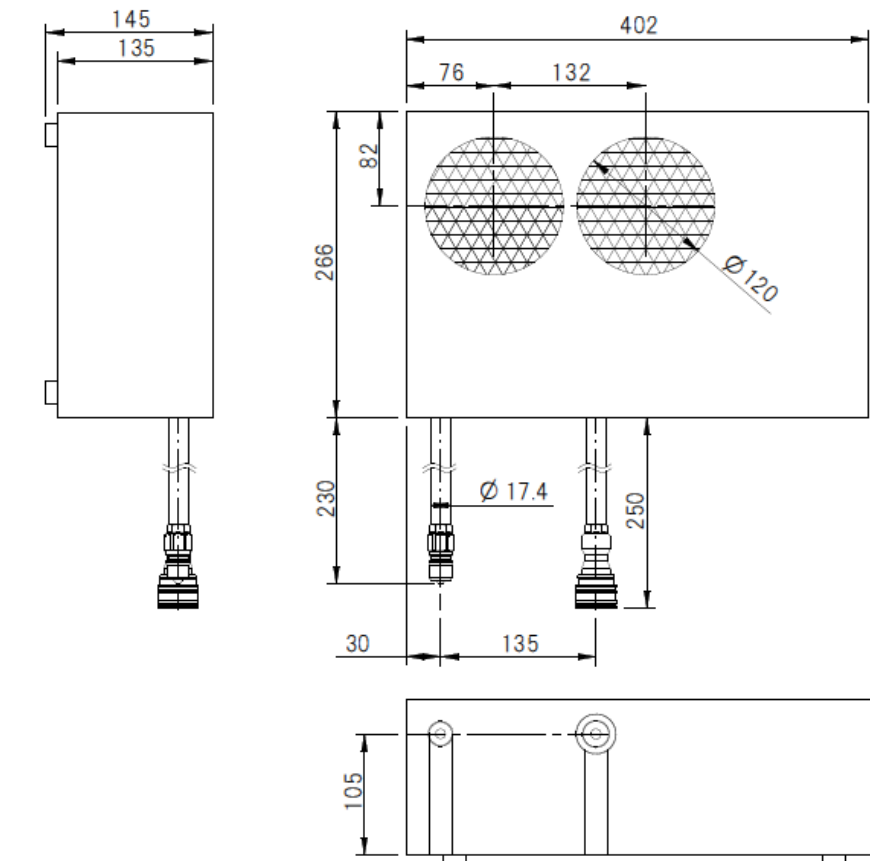

**キヤノン電子管デバイス株式会社**

営業部 応用技術担当

〒324-8550 栃木県大田原市下石上1385番地

Tel (0287)26-6666 Fax (0287)26-6060

<https://etd.canon>

- ・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。
  - ・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステムISO9001及びISO13485の認証を取得しています。
- 適用範囲などは <https://etd.canon/eng/company/quality.htm> を参照ください。