


ロータノード® E7869X

ロータノード E7869X は、1.2 と 0.6 の多重焦点をもち、最高使用管電圧 150kV の回転陽極 X 線管装置で、高速回転で使用できます。

このロータノードは陽極焦点面のクラック防止処理を施したレニウムタングステン・モリブデン張り合わせターゲットを採用しており、汎用撮影に適しております。

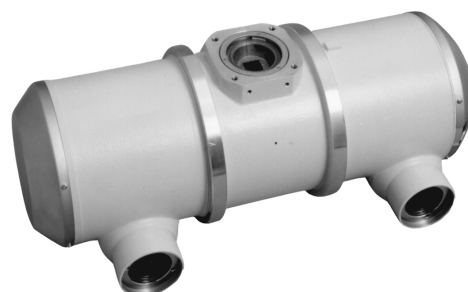

一般定格

電撃に対する保護の形式：

程度による分類 (IEC60601-1:2005+A1:2012) クラス I ME EQUIPMENT

電氣的定格：

使用回路：

高電圧装置 定電圧形 X 線高電圧装置
 接地方式 中性点接地方式

公称最高管電圧：

撮影時 150 kV

公称焦点値：

大焦点 1.2
 小焦点 0.6

公称陽極入力 (0.1s)：(最大入力図参照)

	180 Hz	60 Hz	50 Hz
大焦点	100 kW	58 kW	53 kW
小焦点	40 kW	23 kW	21 kW

公称撮影陽極入力：

	180 Hz	60 Hz	50 Hz
大焦点	100 kW	58 kW	53 kW
小焦点	40 kW	23 kW	21 kW

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。

★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

駆動特性：

ステータ：XS-AG

	起動時		定常時	
	180	50/60	180	50/60
駆動周波数 [Hz]	180	50/60	180	50/60
電力 [W]	3710	800	200	90
電圧 ³⁾⁵⁾ [V]	420	190	80	48
電流 ⁴⁾ [A]	9.6	10.2	3.0	2.2
起動時間 ¹⁾⁷⁾ [s]	1.2	0.8	-	-
分相コンデンサ容量 [μ F]	6	44	6	44
制動時間 ²⁾⁷⁾ [s]	2.0 / 100V (DC)			

注 1) 駆動特性表に記載している起動時間は、0～高速回転に要する値です。透視と撮影を繰り返す低速～高速回転起動の場合は、起動時間は記載値の2/3になります。

2) 高速回転から停止までの時間です。

3) 主コイル-コモン間電圧。

4) コモン電流。

5) 表中の各電圧値は、1.1倍を超えて印加しないこと。

6) 高速での使用頻度は、1分間に2回を超えないこと。

7) 起動、制動時間は、表中各値の1.1倍を超えて印加しないこと。

8) 上記は、推奨の駆動条件です。下記の注)を満たす条件であれば、装置側で別の組み合わせで駆動させることができます。

陽極回転数：

180Hz 電源..... 9700 min⁻¹ 以上

60Hz 電源..... 3200 min⁻¹ 以上

50Hz 電源..... 2700 min⁻¹ 以上

ステータ抵抗：

共通-主コイル..... 9.4 Ω

共通-補助コイル..... 28.3 Ω

絶縁抵抗（低電圧側）..... 2 M Ω 以上

正常使用における管容器温度範囲..... 16 ~ 75 $^{\circ}$ C

動作モード..... 間欠

機械的定格：

外形寸法：

全 長 496 mm
最大部直径 195 mm

ターゲット：

角 度 12°
直 径 100 mm
材 質 レニウムタングステン

ろ過：

固有ろ過 1.1 mm Al / 75 kV IEC60522:1999
追加する付加フィルターの許容厚さは0.4mmから1.2mm 2.6 mm Al / 75 kV

X線遮蔽：

IEC60601-1-3:2008 を満足する。

漏洩線量測定条件 150 kV, 4 mA

X線照射範囲 SID 1000 mm にて 430 × 430 mm

質 量 約 24 kg

高電圧端子 IEC60526 Corrigendum1:2010

冷却方式 自然または強制空冷

管容器型式 XH-112V

使用位置 任意

絶対最大定格

(いかなる場合でもこの値を超えてはならない)

最高使用管電圧：	
撮影時	150 kV
陽極（または陰極）アース間	75 kV
最低使用管電圧	40 kV
最大使用管電流：	
大焦点	1000 mA
小焦点	500 mA
最大フィラメント電流：	
大焦点	5.8 A
小焦点	5.1 A
フィラメント電圧：	
大焦点 (5.8A)	12.4 ~ 16.7 V
小焦点 (5.1A)	9.3 ~ 12.5 V
使用フィラメント加熱電源回路	AC 25 kHz 以下
連続陽極入力	300 W (420 HU/s)
熱特性：	
陽極熱容量	420 kJ (600 kHU)
陽極冷却率	1750 W (2465 HU/s)
管装置熱容量	1420 kJ (2000 kHU)
公称連続入力：	
送風機無	278 W (23 kHU/min)

許容環境条件

使用環境条件：

使用時環境温度 10 ~ 40 °C

使用時湿度 30 ~ 85 %
(結露ないこと)

使用時気圧 70 ~ 106 kPa

輸送条件および保管条件：


輸送および保管温度 -20 ~ 70 °C

輸送および保管湿度 20 ~ 90 %
(結露ないこと)


輸送および保管気圧 50 ~ 106 kPa

最大単発負荷定格

動作条件：定電圧形 X線高電圧装置
 ステータ電源周波数 180 Hz
 公称焦点値：1.2 ■

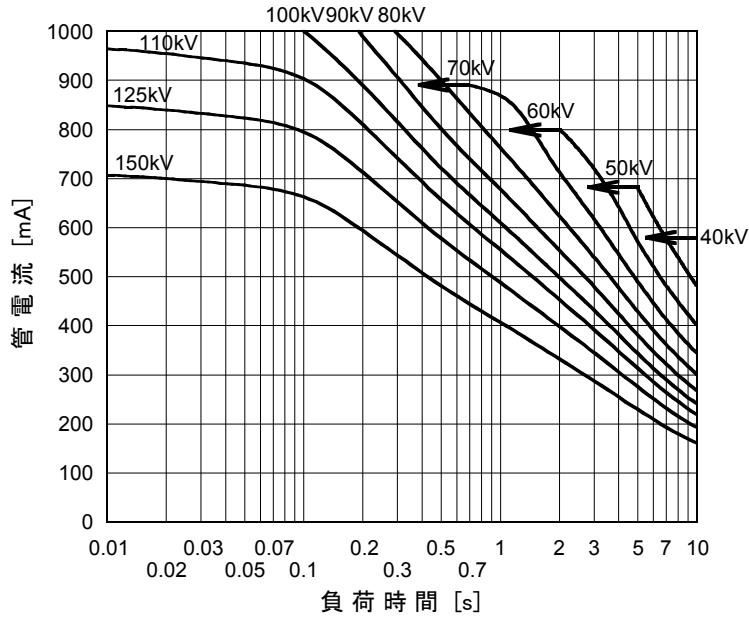


公称焦点値：0.6 □

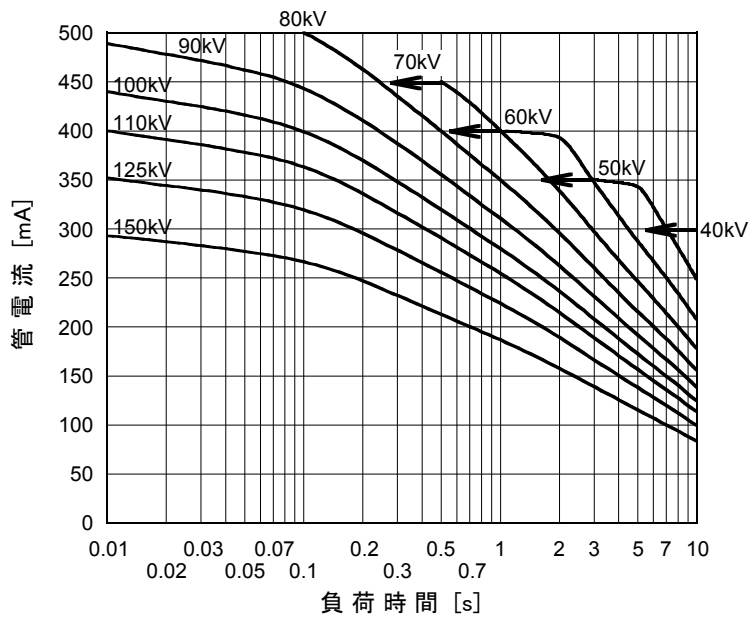


最大単発負荷定格

動作条件：定電圧形 X線高電圧装置
：ステータ電源周波数 60 Hz

公称焦点値：1.2 ■

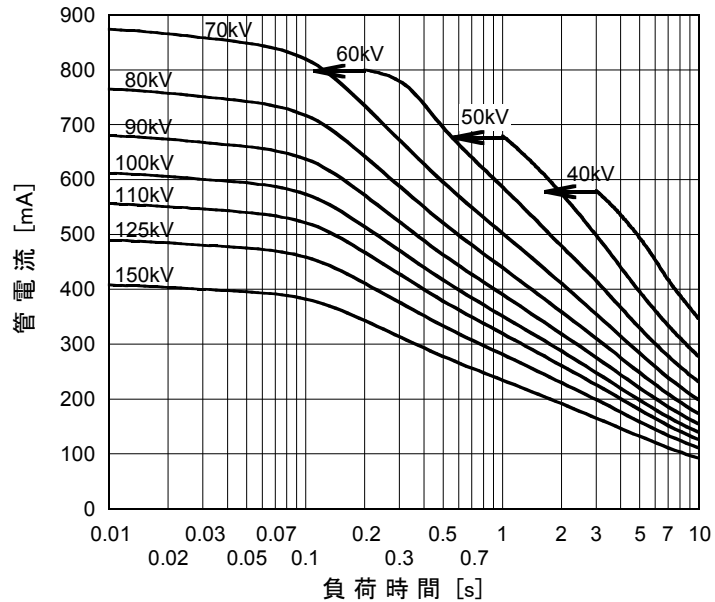


公称焦点値：0.6 □

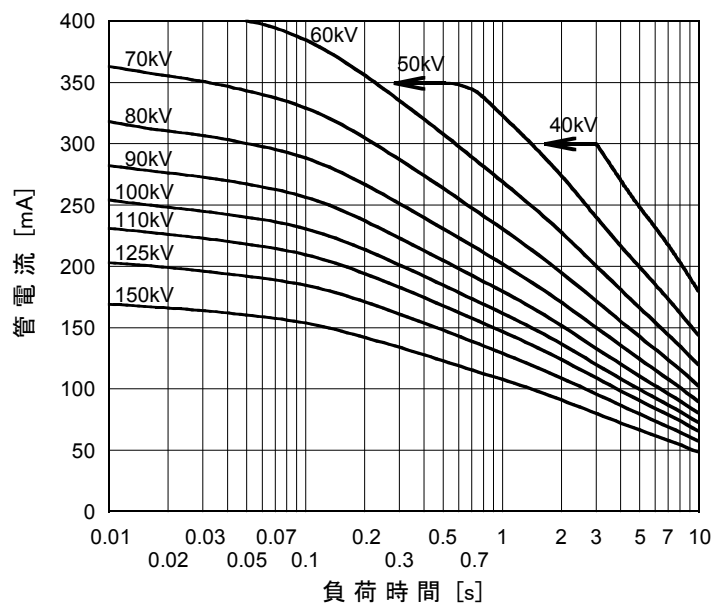


最大単発負荷定格

動作条件：定電圧形 X線高電圧装置
 ：ステータ電源周波数 60Hz

公称焦点値：1.2 ■

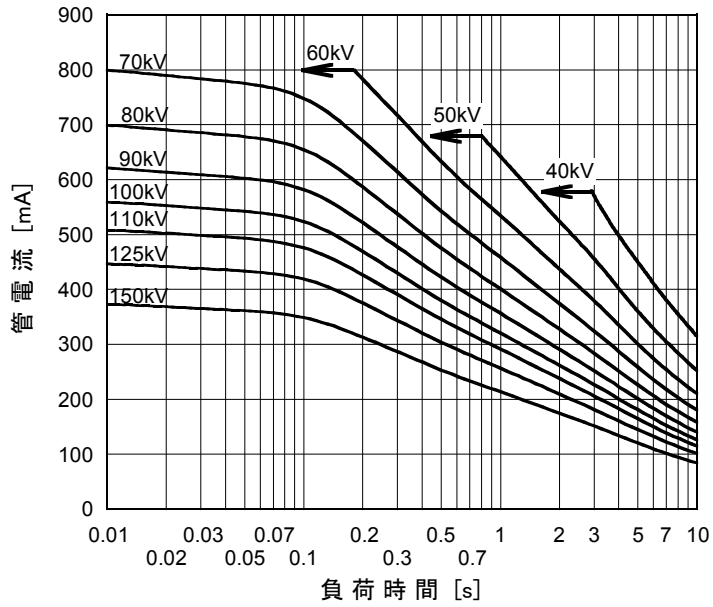


公称焦点値：0.6 □

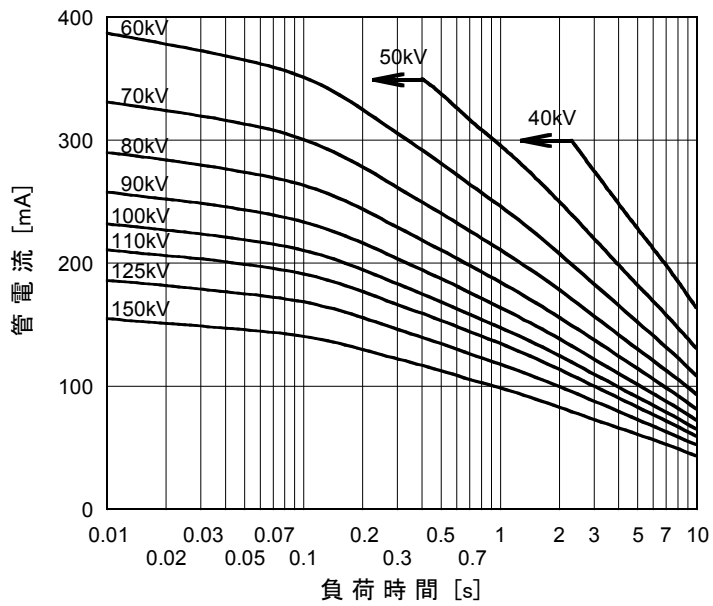


管電流特性・フィラメント特性

定電圧形 X 線高電圧装置

公称焦点値：1. 2 ■

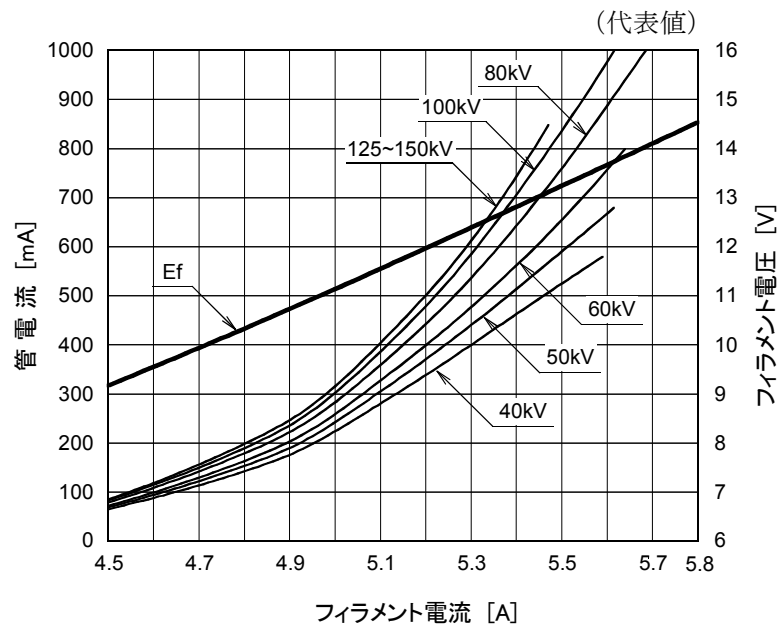


公称焦点値：0. 6 □

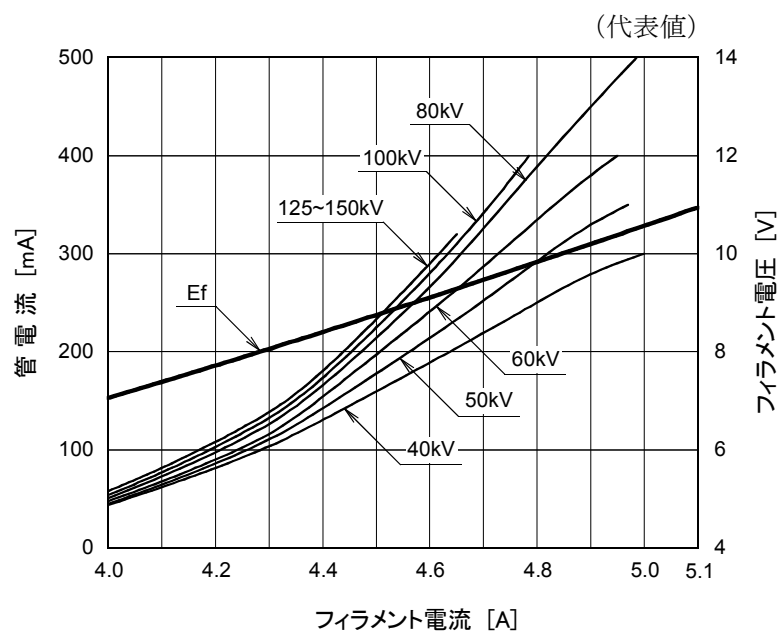


熱特性図

X線管装置加熱・冷却曲線
(周囲温度 25℃で)

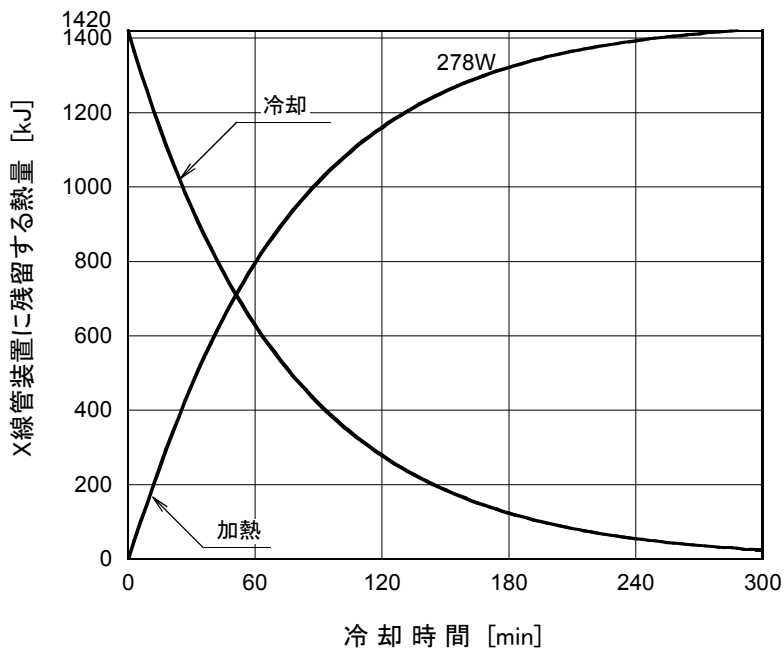


陽極加熱・冷却曲線

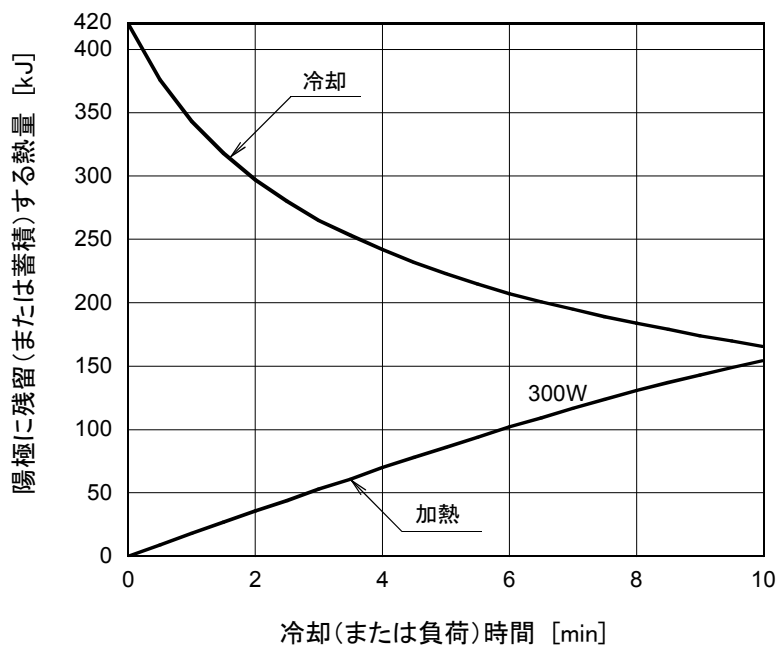

注) 加熱曲線は撮影時のX線管への平均最大入力の例を示します。

外形図

単位 mm

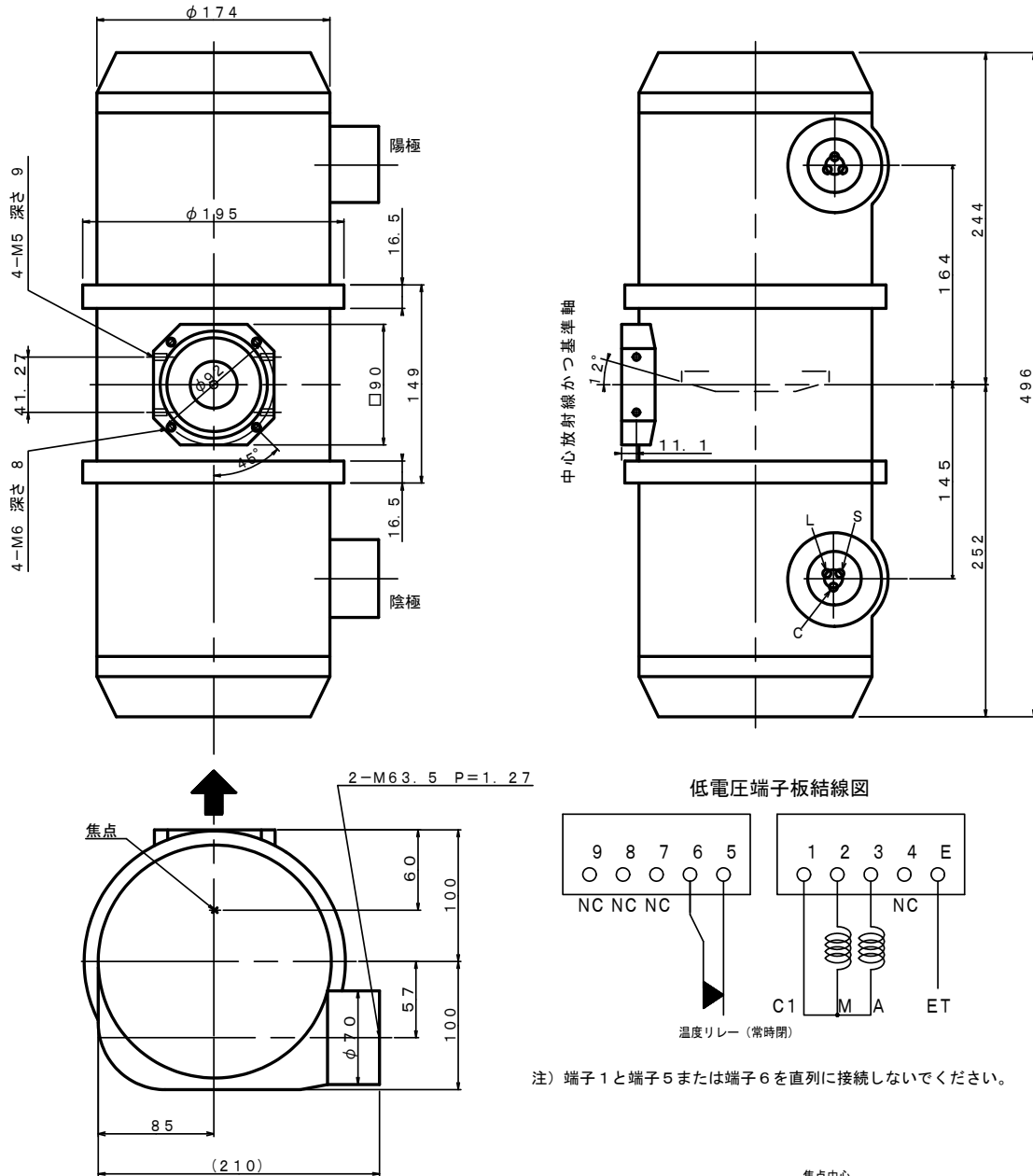


記号説明

陰極端子

- C : 共通
- L : 大焦点
- S : 小焦点

低電圧端子

- C1 : 共通
- M : ステータ主コイル
- A : ステータ補助コイル
- NC : 接続なし
- ET : 接地端子

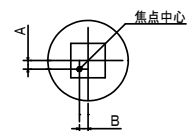

↑ : 主放射線方向
陽極, 陰極端子 : IEC60526形

 **キヤノン電子管デバイス株式会社**

営業部 応用技術担当

〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地

Tel (0287)26-6666 Fax (0287)26-6060

<https://etd.canon>

- ・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
 - ・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
- 適用範囲などは <https://etd.canon/eng/company/quality.htm> を参照ください。