

## X 射线平板探测器

Fix 17×17 inch HD type

有效视野尺寸: 426 (H) × 425 (V) mm  
(16.8" × 16.7" )

### <特征>

- 高 DQE
- 高对比度
- 短周期
- 搭载 AED

#### — 高分辨率 · 高对比度 CsI 荧光膜 —

该产品采用本公司经多年技术培养的细微纤维状结构的厚膜 CsI 荧光面，实现了高分辨率、高对比度的图像显示。

#### — 地噪 ROIC · 模拟线路 —

设计并采用了对应于高感光度 X 射线转换层的 ROIC 和模拟电路。

### <用途>

Fix 17×17 inch HD type 是用于一般性 X 射线摄影的 X 射线平面检出器。

本装置与 X 射线发生装置配套使用，检出透过人体的 X 射线信息并以数字信号输出。

为进行 X 射线图像诊断应该通过软件的图像处理，但其部分不含本装置结构。另外，本装置并无控制 X 射线的技能。本装置并不考虑到对乳房照相术及血管造影检查的用途。

本装置请不要移动，请安置在特定场所或通过机械性方法固定，以不用工具的情况下无法卸下移动。

**组成及性能**

传感器单元：

传感器保护板 ..... 碳纤维板  
 冷却方法 ..... 自然空冷  
 消耗功率 ..... 最大 15W  
 外形尺寸 ..... 459.5 × 459.5 × 15.8 mm (W(H) × D(V) × H)  
 质量 ..... 约 4.5 kg

接口盒：

输入 ..... AC100-240V, 50/60Hz  
 输出 ..... DC24V, 1.3A 30W (MAX)  
 外形尺寸 ..... 280 × 100 × 50 mm (W × D × H)  
 质量 ..... 约 1.1 kg

**环境条件**

	运输和保存时 (请参阅备)	运行时	备考
温度	-20~70°C	+10~35°C	<p><u>保管条件范围</u></p> <p>备注</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不论在使用、输送还是保管，请务必避开结露</li> <li>• 请待到充分适应环境后才开箱</li> <li>• 请确保 8 小时以上的环境适应时间</li> </ul>
湿度	10~90% (无结露)	10~85% (无结露)	
压力	50~106kPa	70~106kPa	

**附属品**

电缆：

交流电缆 ..... 1.8 m × 1  
 接地电缆 ..... 3 m × 1

传感器单元电缆（接口盒 — 传感器单元）(另售)

	型号	长度	备考
1	ECB- F044A-R05/G	5m	含连接器部
2	ECB- F044A-R10/G	10m	含连接器部
3	ECB- F044A-R15/G	15m	含连接器部

\* 对于不明之处，请向本公司咨询。

**主特性**

## 额定：

X 射线转换层 .....	碘化铯(CsI)闪烁体+非晶硅(a-Si)光电二极管
有效显示区域 .....	426 mm (水平方向) × 425 mm (垂直方向) (16.8 × 16.7 英寸)
像素矩阵 .....	3040 (水平方向) × 3036 (垂直方向)
像素间距 .....	140 μm
周期 .....	拍摄两张照片间隔 (单摄像、显影时间 500msec) 6 秒

## 特性：

界限分辨率 .....	3.4Lp/mm (Max).
MTF .....	36 % typ 33% Min (2.0Lp/mm, 70kVp)
DQE (0) .....	75 % typ 70% Min
A/D 转换 .....	16 位


## 绝对最大额定值：

能量范围 .....	40-150 kVp
最大入射线量 (输出线列阵区域) .....	35 μGy

## 接口：

16 位数字输出 .....	16 位数字输出以太网 (1000BASE-T)
指令控制 .....	以太网 (1000BASE-T)
X 射线同步控制 .....	以太网
电源输入 .....	DC24V 1.3A (从接口盒)

产品组成和接口

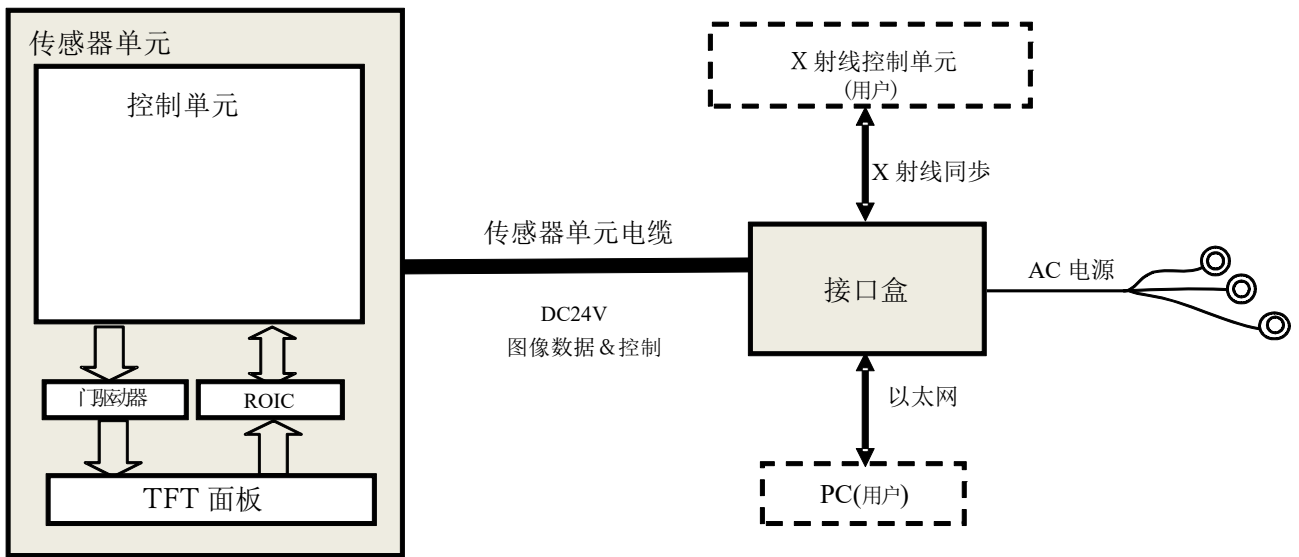


备注：当 DC24V 运行和供应到 FPI 时不要断开以太网连接。

LED显示模式

显示	状态
PWR	电源开通(ON)时点灯
LAN	与以太网的连接正常时点灯

图像获取通信方块图


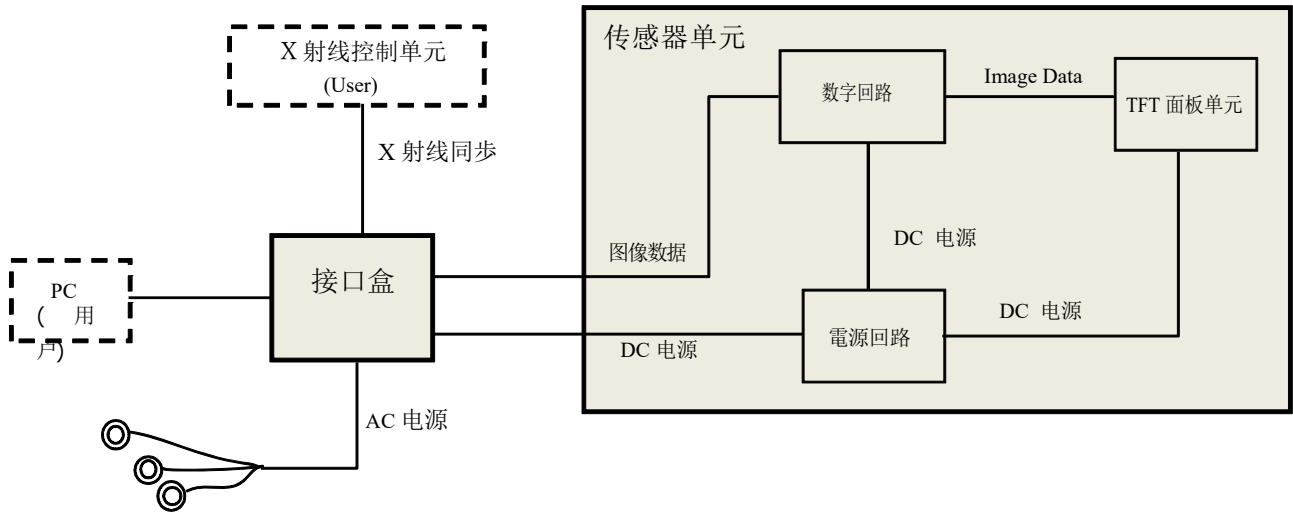


通信有效性

信号名称	类型	以太网指令控制 (PC)	D-Su 信号控制 (X 射线控制器)
EXP_REQ	输入	可	可
EXP_OK	输出	无	可


### 外形尺寸 (传感器单元 入射面)

单位: mm

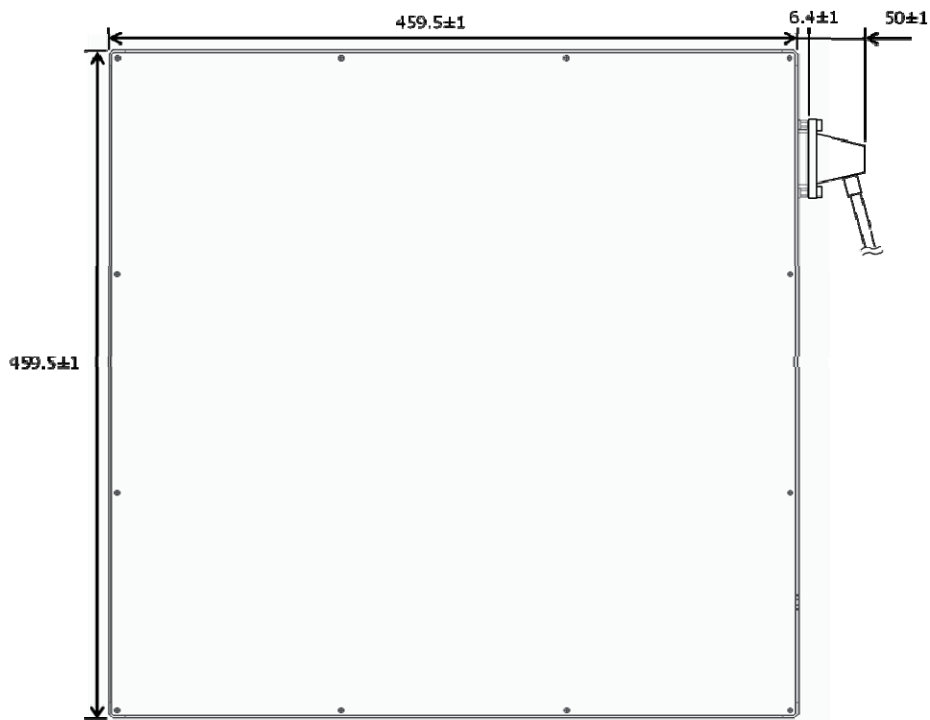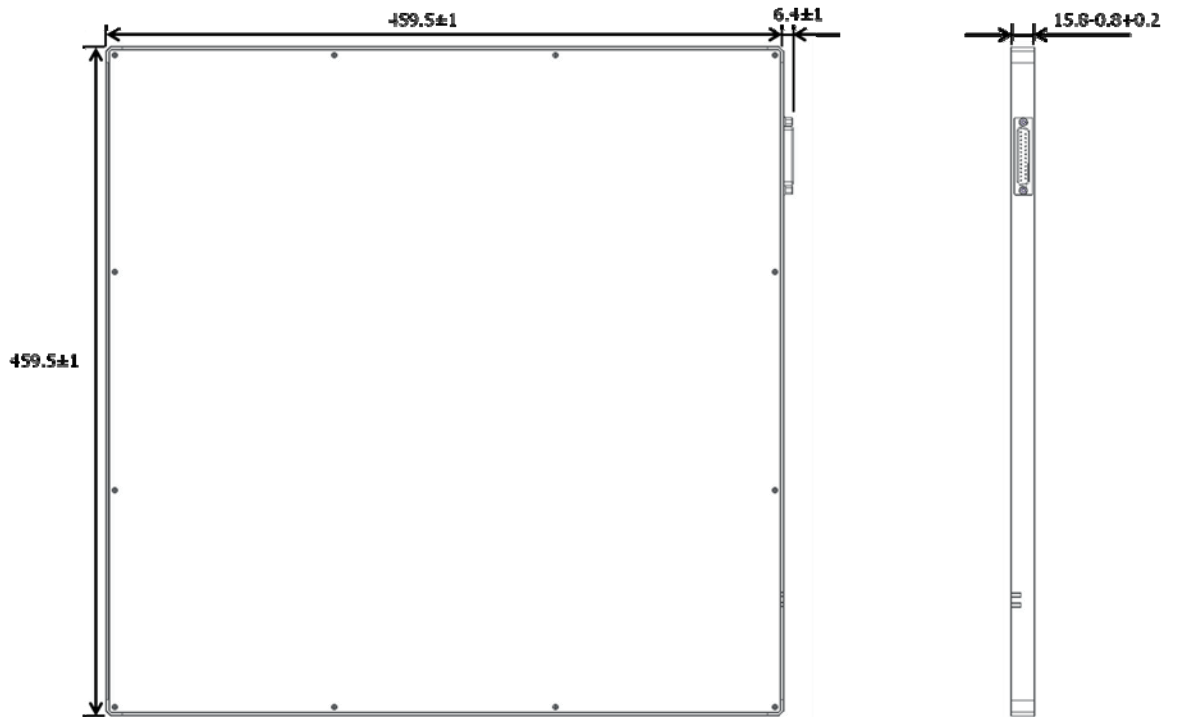


### 外形尺寸 (传感器单元 安装面)

单位: mm

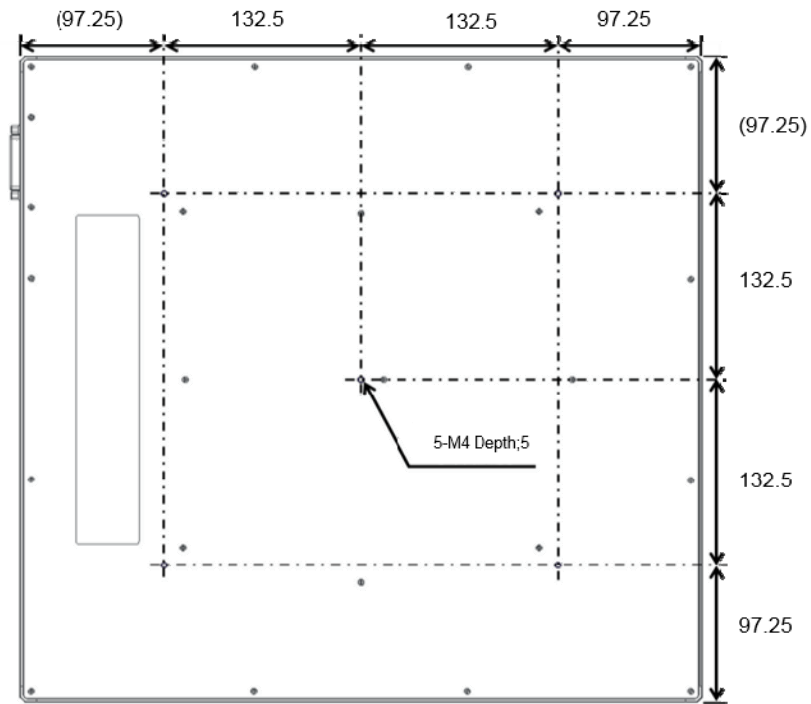

## 外形尺寸 (接口盒)

单位: mm

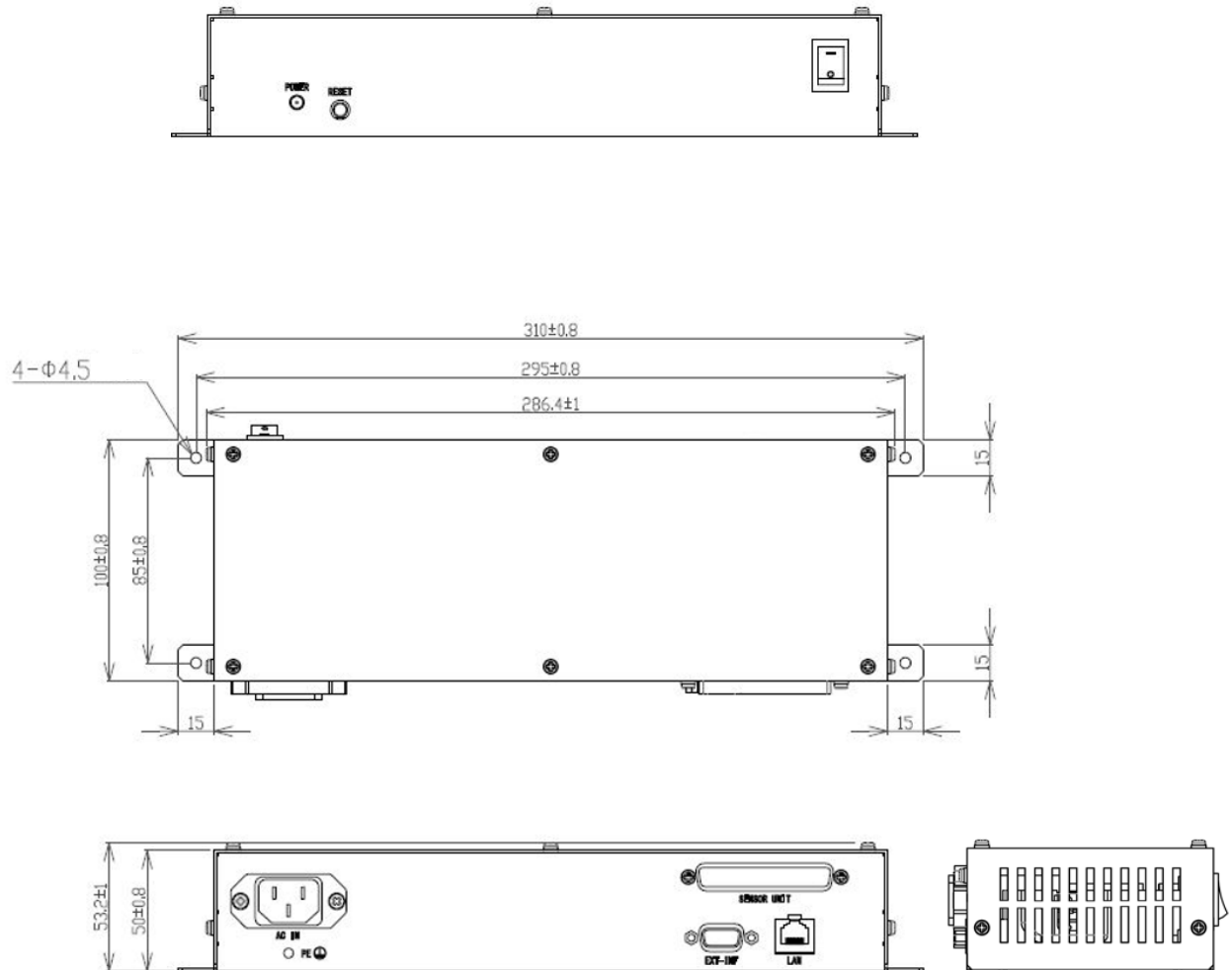

### 佳能电子管器件株式会社

营业部 应用技术课

〒324-8550 日本国栃木县大田原市下石上1385番地

电话 +81-287-26-6666 传真 +81-287-26-6060

<https://etd.canon>